

# 非可视病床分机使用手册


装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	名称	用途
1	分机	产品核心设备, 其中呼叫手柄已安装固定好。
2	合格证	合格检验标志

△ 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同, 以实物为准!




## 一、产品简介

### 1、产品外观

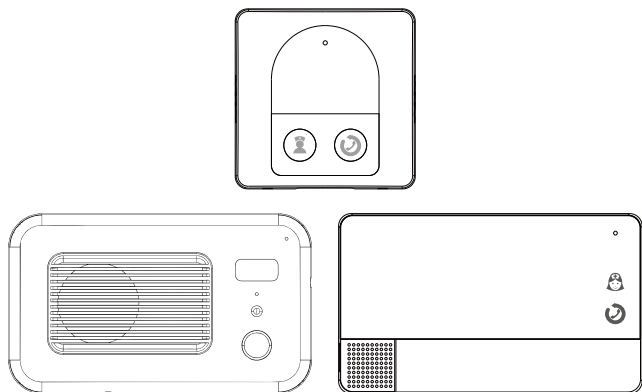

欢迎选用我公司的非可视病床分机产品!

BC210A/BC210B/BC210C病床分机是一款非可视对讲终端, 外观简洁大方, 体积小, 支持呼叫对讲、护理、紧急支援, 指示灯状态功能。

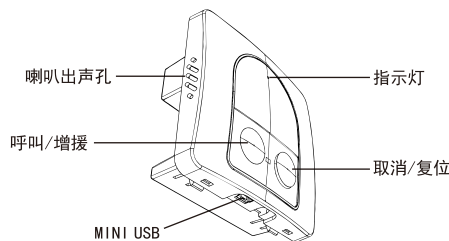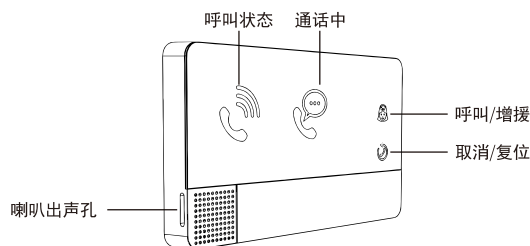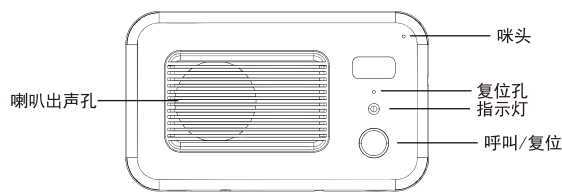

## 二、产品设置

产品接上电源启动后, 将产品的模拟接口接到病房控制器的模拟接口, 并且将病房控制器与电脑连接到同一个网段的局域网中, 使电脑能正常访问该病房控制器。在电脑上打开浏览器, 访问默认的IP: 192.168.100.16, 如果连接成功, 会弹出对话框: 输入用户名: admin, 密码 (初始密码是admin) 登录到系统中。

长按设备面板上的按钮 (约10s), 让设备的电源指示灯进入闪烁状态。在电脑页面上点击【病床号设定】进入病床号设置功能界面

根据客服提供的房号导出表, 把本机号码修改为新的床号, 在“目标病床”“新病床号码”中都输入新的床号, 选中“是否群发”的选项, 点击【保存】按钮即可, 之后设备会重新启动, 从电源指示灯恢复常亮表示重启完成。

## 三、呼叫和对讲

病床呼叫可分为几种类型, 分别是: 普通呼叫: 按下病床手柄上的按钮进行呼叫, 医护主机可接听或复位, 病床也可以通过面板的按键进行挂断呼叫; 紧急呼叫: 按下病床分机面板上的手柄按钮进行呼叫, 医护主机可接听或复位, 病床也可以通过面板的按键进行挂断呼叫;

紧急增援: 紧急增援功能只有病房在“护理中”的状态下才能生效, 否则系统不会作出任何响应。当护士按下病房控制器【护理】按键后, 该病房进入“护理中”状态, 这时按下病床分机面板上的按键可对医护主机发起“请求支援”呼叫, 再次按按键可以取消呼叫;

## 四、接听呼叫

医护主机可以直接呼叫病床分机, 病床分机在响铃后会进行接听, 之后病人可以直接跟医护人员进行对话。

## 五、通话控制

在病房分机与医护主机或医护分机进行通话过程中, 可随时按下面板上的按键结束通话。

## 六、音量控制

产品的铃声与通话声音本机上无法直接调节, 只可以到病房控制器上进行设置, 在病房控制器的【基本设定】中设置, 【铃声音量】调节响铃的声音大小, 【通话音量】调节通话声音的大小, 设置完成后点击【确认】即可。

## 七、安装说明

### BC210A/BC210B非可视病床分机安装说明

一、设备带开孔。1.按照图纸尺寸在设备带上开孔。




二、安装非可视病床分机。1.将设备带后盖用两颗M3.5\*16mm的沉头自攻燕尾螺丝打在设备带或86盒上。2.将线槽的网线, 电源线等功能线接口插到设备上后将前扣在后盖上。



3.将病床分机的手柄支架用两颗M3\*8mm的螺丝固定在设备带或86盒上。4.将病床分机的手柄挂在支架上即可安装完毕。

### BC210C非可视病床分机安装说明

一、设备带开孔。1.按照图纸尺寸在设备带上开孔。


二、安装非可视病床分机。1.将线槽的网线, 电源线等功能线接口插到设备上。2.将设备倾斜一定角度后对准开孔位置卡进设备带上, 再用2颗M3\*8沉头自攻螺丝将设备固定。3.将病床分机面盖对准卡位按压装进病床分机上。4.将病床分机的手柄固定铁片贴上背胶粘在设备带上。

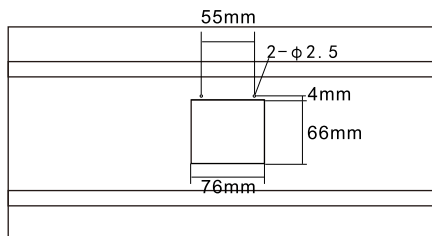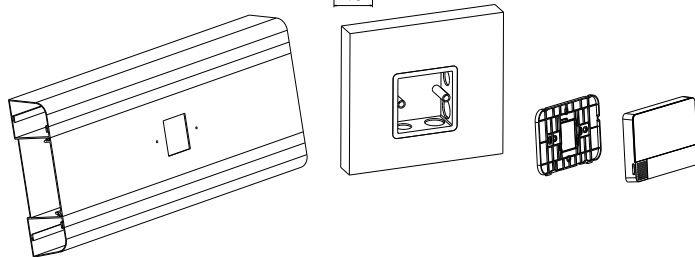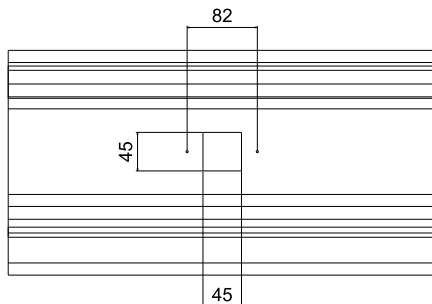

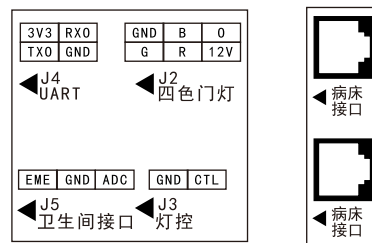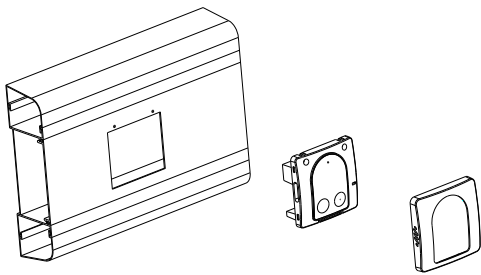


BC210C

八、接口接线说明

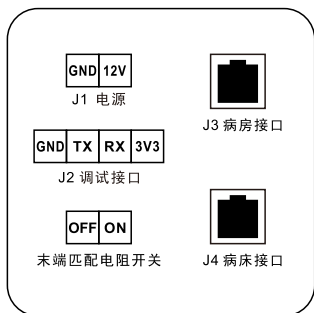

BC210A

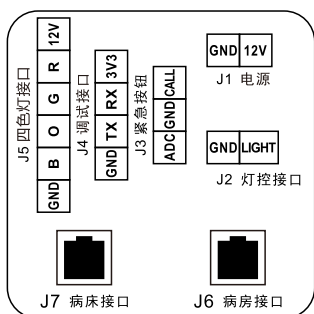

BC210B

九、技术参数

供电电源	DC12V
最大功耗	待机2.5W, 最大4W
联网接口	RJ45 10M/100M
安装方式	壁挂式/86盒
工作温度及湿度	-5℃ ~ +40℃, 10% ~ 90%
整机尺寸	BC210A: 145*86*27.5mm BC210B: 145*86*27.5mm BC210C: 80*80*40mm

十、故障分析与排除

如系统不正常, 断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因, 请通知代理销售商或厂家, 不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

为维护您的权益, 请您认真填写, 并妥善保管, 作为维修时的凭证:

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	开机后屏幕无反应	电源线接插座是否插稳或接错	1、检查电源线是否有电压或插好 2、连接线是否接好 3、转接板是否正常
2	无法按键操作	1、上电按键是否有背光 2、按键板是否松动	1、检查按键板连接
3	无法连接云平台	1、网络是否接通 2、机器注册编号错误重复 3、设备IP, 路由器IP是否正确	1、检查设备网络连接 2、设置机器编号 3、设备IP和路由器IP重设 4、是否连接备用IP服务器
4	可开锁, 但无抓拍视频	网络线是否插好, 或摄像头被遮挡	重新检查网络线及设备硬件检测摄像头是否正常
5	用户不能开锁	外接开锁模块或门禁卡故障	检查或更换开锁模块或门禁卡

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	